

Harpy Lizenzprobleme bei EasyOne Connect

Januar 20, 2025

Anwendungsbereich

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie ein Problem beheben, das am 20. Januar 2025 in der EasyOne Connect-Software aufgetreten ist. Das Problem wird durch Dateien verursacht, deren Lizenzierung an diesem Datum ablief.


Die folgende Softwareversion ist betroffen: EasyOne Connect auf PC, V3.9.5.19.

Im Folgenden wird eine schnelle Lösung zur Verfügung gestellt. Um diese Änderung vorzunehmen, benötigen Sie Administratorrechte für Ihren PC.

Quick Fix für EasyOne Connect V3.9.5.19

Um die folgenden Schritte auszuführen, muss Ihr PC mit dem Internet verbunden sein, damit Sie eine Zip-Datei herunterladen können.

- Laden Sie die Zip-Datei über den folgenden Link herunter: [DeleteHarpyFiles.zip](#)
- Speichern Sie die Zip-Datei in Ihrem „Downloads“-Ordner, indem Sie auf das Symbol oben links klicken:

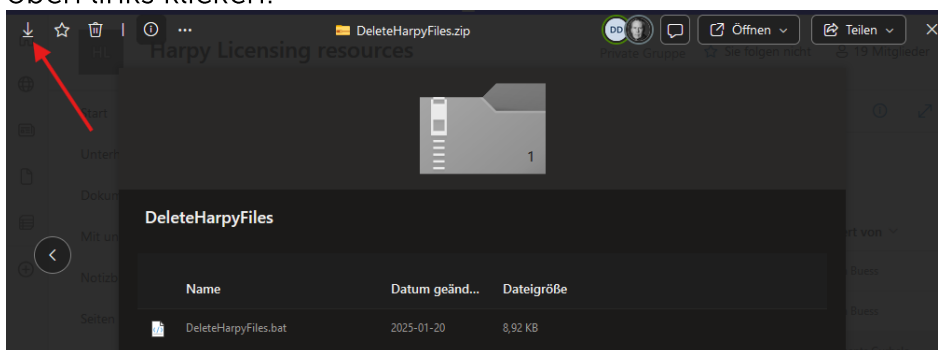

- Navigieren Sie zu der heruntergeladenen Datei und extrahieren Sie die Datei, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und „Alles extrahieren“ auswählen.
- Navigieren Sie zum Ordner „DeleteHarpyFiles“ und doppelklicken Sie auf die Datei „DeleteHarpyFiles.bat“.
- Es wird eine Meldung angezeigt, dass Windows Ihren PC schützt. Klicken Sie auf 'Weitere Informationen' und geben Sie das Administrator-Login und das Passwort für Ihren PC ein.
- Nachdem die Batch-Datei ausgeführt wurde, können Sie EasyOne Connect normal verwenden.